

安心量 BE-4301

不只量心安



USB供電不擔心 · 讓你揪甘心

操作簡易 · 安心又自在



溫度正常

國語播報



溫度微高

發出警報



溫度過高

發出警報

3大優點

測溫快 | 超省電 | 免人力




USB供電



國語播報



超大螢幕

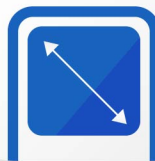

多筆記錄



適用場景

辦公室



車站



診所·醫院



百貨




超市·超商



公車



健身中心

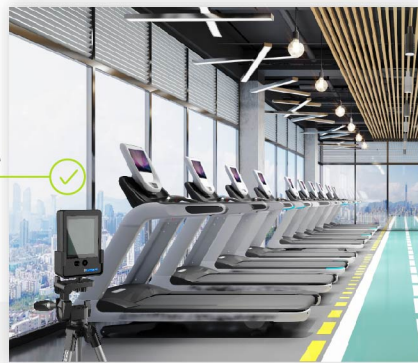

教室




簡單·卻不平凡·輕鬆掌握溫度



快速測溫



自動感應

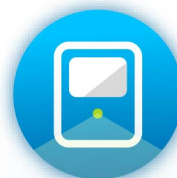

非接觸式




容易安裝

快速測溫 快速通行

用先進的科技 守護您的健康



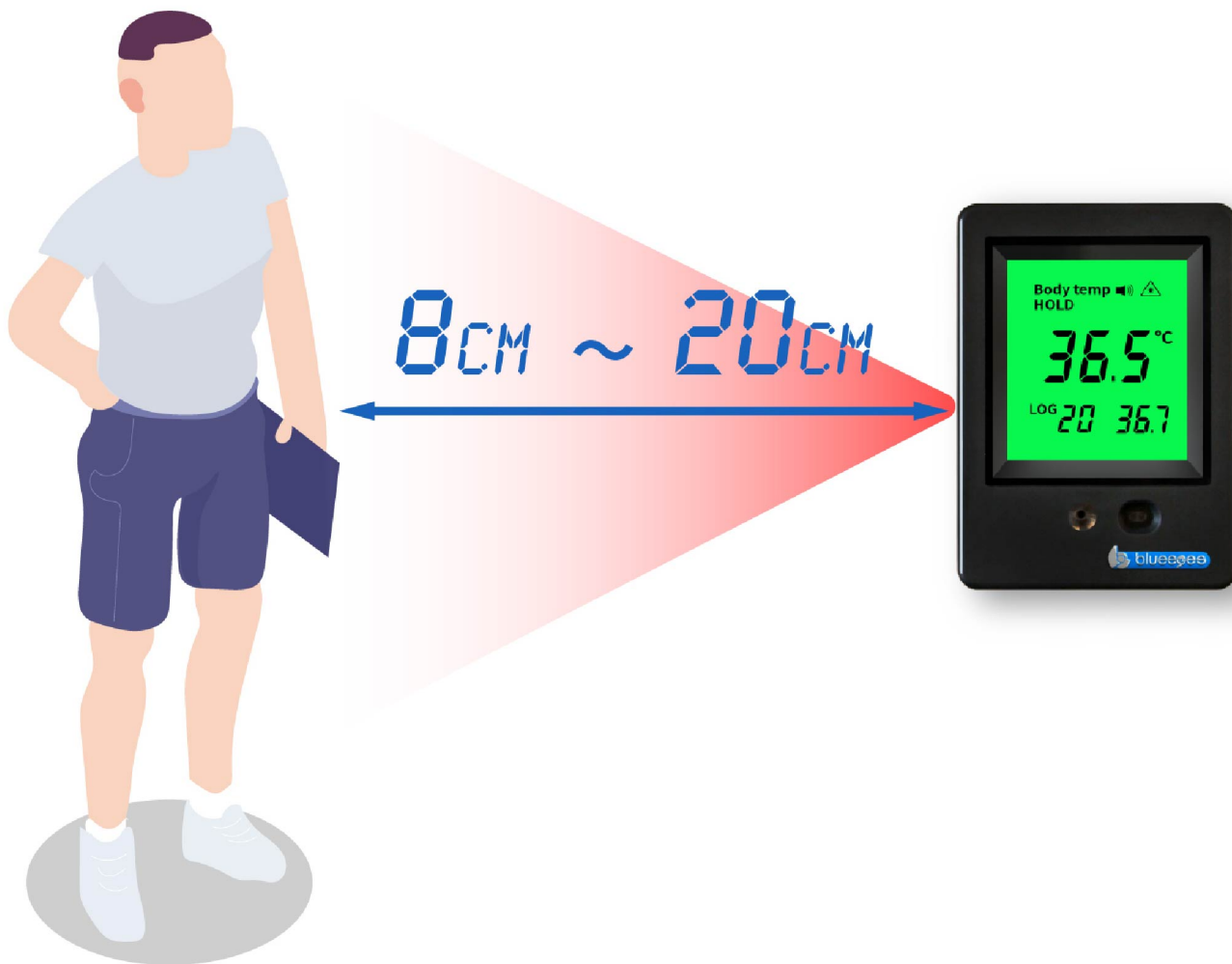

人潮管控



進出查核




守護健康

智慧測溫 安全防護

舉手自動檢測 · 快速識別 · 品質可靠

更安全的測溫距離 >

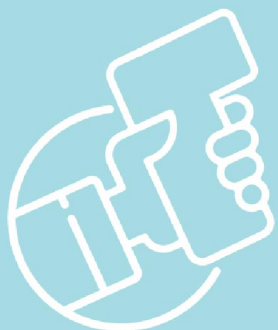

傳統手持測溫

效率低，通行慢
易群聚，易感染
費人力，耗時間



智慧自動測溫

快速通行，效率高
非接觸，不易感染
最新晶片，精度高



大螢幕顯示

溫度數字 一目了然

高清晰顯示，超大螢幕占整體 2/3
顯示字體大且清晰，溫度一覽無遺

完全零接觸式 智慧自動測溫

溫度精準度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$



快速檢測
高溫預警



國語播報
隨意放置




高溫警報 三色顯示

檢測到溫度過高時，螢幕亮紅色並發出響亮的警報聲



溫度正常 **通行**

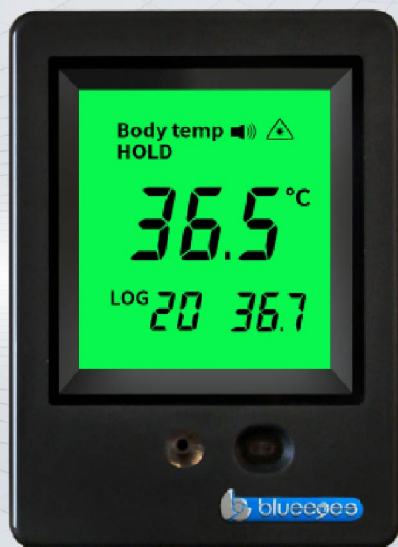

國語播報

綠色

35.2°C - 37.2 °C



溫度微高 **複測**



發出警報

橘色

37.3°C - 37.9°C



溫度異常 **禁止**



發出警告

紅色


≥38 °C




隨意移動 靈活安裝

滿足更多應用場景

支援多種安裝方式

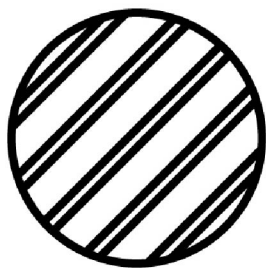

背膠安裝

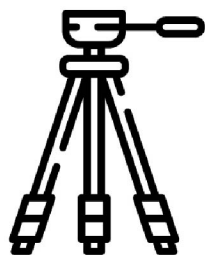


三腳架安裝




螺釘固定

安裝及供電方式

安裝方式 ① 固定於牆壁

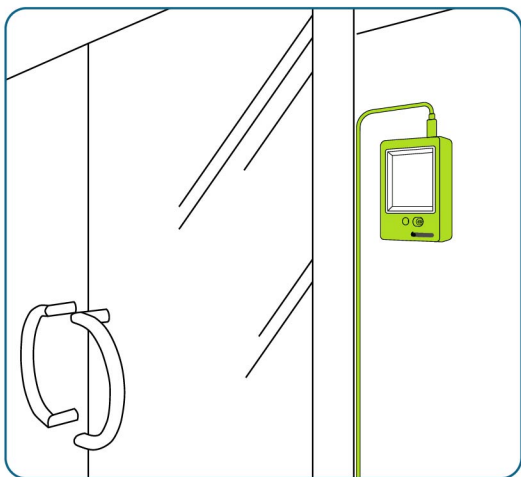


安裝方式 ② 安裝於腳架

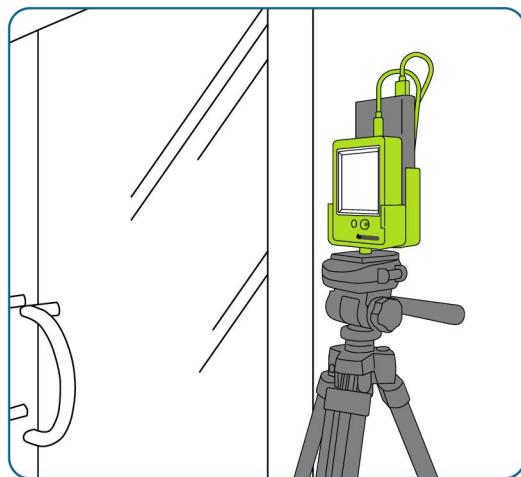


*出貨不含腳架與行動電源

供電方式 ① 市電

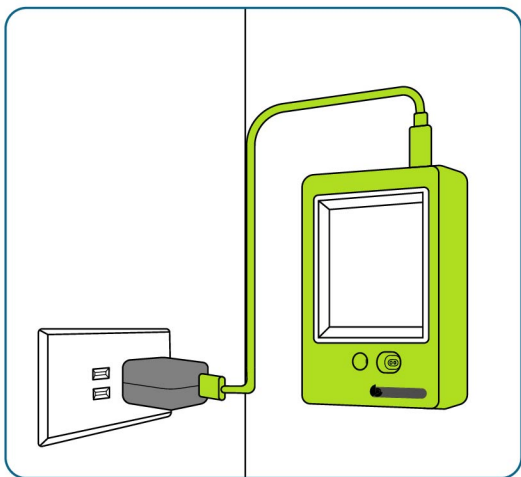

*出貨不含電源變壓器

供電方式 ② 行動電源

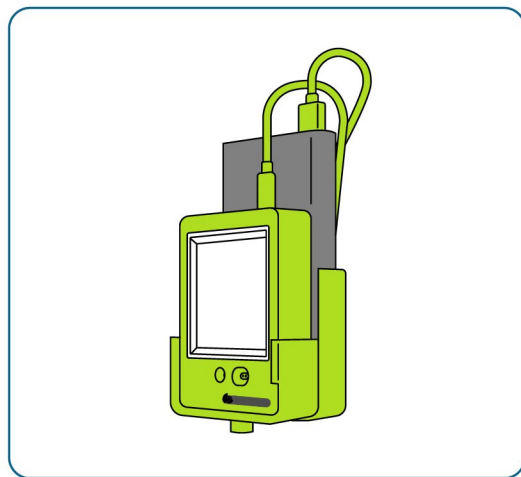

*出貨不含行動電源

*5000mA行動電源連續使用約60小時

產品規格

溫度測量範圍	35.2~42.9°C
精度	±0.3°C
溫度最小單位	0.1°C
螢幕燈光顯示	紅/綠/橙
語音播報內容	國語
紅外線感應	有
移動偵測	有
高溫報警	有
自動節能	有
測量時間	2秒
測量距離	8~20cm
電源	USB 5V/1A
待機功耗	50mW
溫度單位	攝氏°C / 華氏°F
溫度記憶	20組數據
儲存溫度	10~35°C
重量	約0.5kg
尺寸	L110 x W80 x H27mm

★隨貨附贈2公尺USB線

購買與使用前

請詳細閱讀以下注意事項

1. 本設備的工作原理是先透過移動偵測器，感應物體靠近適合距離範圍，接著啟動溫度感知器量測溫度，最後將溫度值顯示於螢幕上。
2. 本設備建議安裝於室內無風環境，設備功能主要是偵測人體溫度，針對發熱超過標準時進行告警，人體溫度正常是攝氏 35.2 度以上，故本設備僅針對 35.2 攝氏度以上溫度進行語音播報，非作為測量任何物體之用。
3. 本設備偵測溫度範圍是 35.2~42.9 攝氏度(°C)，低於 35.2 度無法測量，高於 42.9 度亦無法測量，請特別注意。
4. 本設備主要是偵測皮膚溫度，也就是皮膚表面的溫度，外在環境會影響皮膚溫度量測，請特別注意遠離風扇、空調、出風口、自動門等有空氣流動環境。
5. 如外在環境有空氣流動，難以克服或遠離時，可自行製作罩子包住設備，降低環境風影響。
6. 攝氏 35.2 度以下無語音播放，顯示屏會顯示 LO，右下角會顯示實際測出來的溫度。低於 35.2 度預設非人體溫度，測值會顯示在 LOG。如溫度在 32-35 度區間，預設是偏低的人體溫度，本設備會直接以 35.2 攝氏度顯示。攝氏 35.2 度以下會自動判斷為非人體溫度，按實際溫度顯示數字於右下角。
7. 冬天或天氣寒冷時，不建議測量手溫，量測額頭會更合適。因手溫很容易低於 35.2 度，但額溫很少低於 35.2 度。
8. 測量溫度時，請以頭部額頭溫度為第一優先，如果是測量手掌溫度，可能會因為天氣冷，或手接觸冷飲或熱飲有所變化，請特別注意。
9. 人體探測時間過短，可能會導致測量到的是空氣溫度顯示過低，請務必停留 2 秒。
10. 不要放置於高溫、高濕環境，不要給兒童玩耍。
11. 不要放置於陽光暴曬、淋雨地方使用，避免損壞產品。
12. 不要重力摔落，或敲打產品會導致產品損壞。
13. 注意產品日常保養，及時清理感測器灰塵，以獲取最佳的測量精度。
14. 配件中放置行動電源的固定座，其口徑為寬 77mm 深 17mm，建議使用符合尺寸可置入的 USB-A 行動電源較為方便，例如：小米行動電源。
15. 每天使用 9 小時，容量 5000mAh 的行動電源約可維持一周的電量。
16. 本產品出貨沒有附電源變壓器，請使用市售具有安規的 USB Type A 介面 5V1A 變壓器。
17. BE-4301 通電後單位轉換鍵與記憶查詢鍵不能同時按下，如此做會造成 BE-4301 出廠校準的數據被清除而不能使用，此判定為人為損壞，非屬於標準保固範圍內，請特別注意！
18. 注意！本設備 BE-4301 非醫療器材，測量值不能作為醫療用途使用，亦不保證量測值正確。
19. 如使用 BE-4301 測量人體表面溫度，表面溫度會因測量環境、人體表面形狀與穿戴物等變化，真正人體實際溫度仍須以政府認證之醫療器材，例如耳溫槍、額溫槍、溫度計等測量為準，本產品非醫療等級設備，不能作為主要人體實際溫度量測使用。